

depil Yourself®

Do-It-Yourself Haarentfernung

XS S M L XL XXL

Wählen Sie Ihren Pass nach Ihrem Bedarf.



Entdecken Sie die Freude, **das ganze Jahr über eine glatte, gepflegte Haut** zu haben.

Erwiesene Wirksamkeit von der ersten Behandlung an.

Ihr Depil Yourself Partner



www.e-swin.com

Das Prinzip des Pulslichts

Das Haar steckt in einem Schaft, an dessen Ende sich die Struktur zur Nährstoffversorgung befindet. Es entwickelt sich in einem Zyklus des Haarwachstums.

Die Wirkung der Pulslicht-Technologie beruht auf der Aussendung eines sehr verstärkten Lichtblitzes (Flash). Dieses Licht wird vom Haar absorbiert und dabei in Wärme umgewandelt. Die so freigesetzte Wärme zerstört die Struktur zur Nährstoffversorgung des Haares. Wenn diese Struktur zerstört ist, wächst das Haar nicht mehr nach.

Die an der Hautoberfläche sichtbaren Haare befinden sich nicht alle in der gleichen Phase des Haarwachstums-Zyklus. Darum werden sie auch nicht alle im Laufe einer einzigen Behandlung von der Pulslicht-Wirkung erfasst. Die Pulslicht-Anwendung muss im Durchschnitt alle 2 Monate wiederholt werden. Es sind im Durchschnitt 10 bis 12 Behandlungen erforderlich, um durch Zerstörung aller Nährstoffstrukturen ein bleibendes Ergebnis zu erzielen.

Der Vorteil des Pulslichts gegenüber dem Laser besteht darin, dass mit Pulslicht sowohl helle als auch dunkle Haare behandelt werden können. Die Pulslicht-Technologie ist viel sicherer für die Haut.

Diese Vorrichtungen wurden von E-Swin (Frankreich) entwickelt und werden von diesem Unternehmen hergestellt. Diese Vorrichtungen sind Merkmalsprodukte der Klasse II laut Verordnung und tragen das CE-Zeichen. Sie sind für den persönlichen Gebrauch vorgesehen. Mischen Sie sich bitte vor jedem Gebrauch der Vorrichtungen mit der Gebrauchsanleitung vertraut. Halten Sie bitte die in der Anleitung angegebenen Gebrauchsbedingungen ein. Entwicklung: www.lezarts-creation.com - Die Fotos sind unverbindlich und stellen keinen Vertragsbestandteil dar - Nicht im öffentlichen Bereich wegwerfen.

ERSTER HERSTELLER VON GERÄTEN DER LICHT-SPITZENTECHNOLOGIE IN FRANKREICH

Ein völlig neues **Beauty-Konzept!**

depilYourself®

Dauerhafte Haarentfernung einfacher & günstiger

Das Konzept Depil Yourself ermöglicht Ihnen einen kostengünstigeren Zugang zu professioneller, dauerhafter Haarentfernung.

Es steht Ihnen dafür ein Haarentfernungs-Gerät neuester Generation zur Verfügung - in einem speziell dafür eingerichteten Bereich bei Ihrem Depil Yourself Partner.

Sie wählen entsprechend Ihren Wünschen den zu enthaarenden Bereich Ihres Körpers. Für jeden Körperbereich gibt es eine entsprechende «Pass»-Karte. Es sind 6 verschiedene «Pass»-Karten erhältlich.

Für das Enthaaren der Achselhöhlen ist zum Beispiel der «Pass S» am besten geeignet. Für den Bereich «Unterschenkel» wählen Sie den «Pass XL».

Für jeden Körperbereich gibt es eine entsprechende «Pass»-Karte



Die Vorteile der Do-It-Yourself Anwendung

Mit der neuen Möglichkeit zur Selbstbedienung, steht Ihnen die von Fachinstituten verwendete professionelle Technologie zur eigenen Anwendung zur Verfügung. Sie führen selbst und damit mit geringerem Kostenaufwand die Behandlungen zur dauerhaften Haarentfernung durch und genießen dabei die ungestörte Atmosphäre einer Heimanwendung.

Außerdem erlaubt das Depil Yourself Konzept auch größere Flexibilität. Sie sind nicht mehr abhängig von der Verfügbarkeit eines Beauty-Profis, denn Sie können die Behandlungstermine ganz nach Ihrem persönlichen Kalender planen.

Und Sie werden begeistert feststellen, wie einfach und dennoch 100% sicher die Bedienung des Depil Yourself Gerätes ist. Der Berührungs-Bildschirm erlaubt die individuelle Einstellung entsprechend dem zu behandelnden Bereich, der Hautfarbe, der Haarstärke und der gewünschten Behandlungsintensität.

Erzielte Ergebnisse

1. Zwischen dem 8. und 12. Tag nach jeder Behandlung fallen die Haare nach und nach aus.
2. Die Struktur der Nährstoffversorgung der Haare, welche den Wachstumszyklus ermöglicht, wird im Lauf der Behandlungen zerstört. Sie werden von den ersten Behandlungen an ein deutlich verringertes Nachwachsen der Haare feststellen.
3. Optimale Ergebnisse werden im Durchschnitt mit 10 bis 12 Behandlungen erzielt, die im Abstand von 2 Monaten durchgeführt werden. Später genügen 1 bis 2 Nachbehandlungen pro Jahr, um dauerhaft glatte, gepflegte Haut zu genießen.

Entdecken Sie die Freude an einer **dauerhaft glatten, gepflegten Haut!**

Wie ist der Verlauf einer Behandlung?

Die Dauer einer Behandlung zur dauerhaften Haarentfernung mittels Pulslicht variiert je nach dem zu enthaarenden Bereich des Körpers. Zum Beispiel genügen für das Enthaaren der Achselhöhlen 10 Minuten. Für das Enthaaren der Unterschenkel sind circa 20 bis 30 Minuten einzuplanen. In der Praxis wählen Sie zunächst den zu enthaarenden Bereich, nehmen danach die entsprechende Einstellung am Gerät vor und anschließend können Sie «blitzen». So einfach ist das!

Ist das Pulslicht etwas für mich?

Ist Ihre Haut sehr hell bis mattbraun und sind Ihre Haare blond bis dunkel. Dann ist das Pulslicht etwas für Sie. Ihr Depil Yourself Partner kann Sie gern beraten und Ihre Fragen beantworten.

Sie werden angenehm überrascht sein, dass Sie vom Blitz an sich fast nichts spüren. Höchstens ein leichtes Prickeln an sehr empfindlichen Hautzonen macht sich bemerkbar.

Und Sie werden erstaunt sein, wie einfach, schnell und sanft die Behandlung ist.

